

DRIONIC ANTI-TRANSPIRATIETOESTEL HANDEN EN VOETEN



1. INHOUD TOESTEL

- vier matjes
- Toestel en batterijen
- Extra paar batterijen



2. GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding

- Neem de viltjes uit het toestel en dompel deze in leidingwater (geen gedestilleerd water) gedurende ongeveer vijf minuten.
- Viltjes niet uitwringen en plaats deze terug in het toestel over de metalen plaatjes.
- Het diepe gedeelte dien je op te vullen met leidingwater. Wanneer uw hand of voet in het toestel geplaatst is, dient het water tot ongeveer vijf millimeter van de rand te komen. Op het verhoogde gedeelte moet er een dunne waterfilm op de viltjes te liggen (indien niet het geval, nog een beetje water bijgieten).
- Belangrijk: er mag geen water komen in het toestel zelf waar de elektronica van het toestel zit. Indien dit toch gebeurt, zet het toestel meteen uit en dep alles droog.

Werkwijze

- Zet het toestel aan (controlelampje brandt groen) op de laagst mogelijke stand.
- Plaats uw hand of voet zoals gedemonstreerd op de tekening.

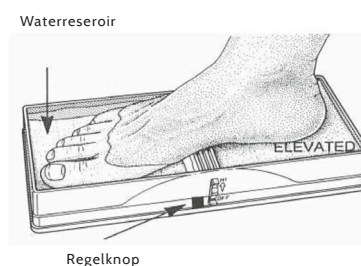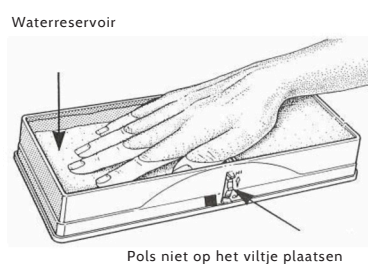

Regelknop

Handpositie : Duim zo kort mogelijk bij de regelknop plaatsen

- Het is belangrijk dat de vingers / tenen ondergedompeld zijn in water in het lagere gedeelte. De rest van uw hand / voet rust op het hogere gedeelte (op viltje) en wordt ook behandeld. Opgelet, deze viltjes dienen daarom ook nat te zijn om de doorstroom van de elektrische impulsen te garanderen.
- De regelknop langzaam naar boven draaien (van LO naar HI draaien) tot aan het niveau dat je kan verdragen. Bij gewaarwording van tintelingen zit je goed. Dit dien je dertig minuten vol te houden. Indien je pijn ervaart, dien je het toestel wat lager te zetten.
- Na de behandeling dien je de regelknop naar onder te draaien (van HI naar LO) tot het controlelampje uit is.
- Water verwijderen uit reservoir na iedere beurt.
Viltjes uitnemen, naspoelen met water en laten drogen aan beide kanten.

Behandeling voor handen

Handen zijn gevoeliger dan voeten voor de elektrische impulsen. Vaseline kan met mate aangebracht worden op de heel gevoelige plaatsen. Leg je handen altijd plat in het toestel, nooit zodanig dat alleen de vingertoppen het toestel raken.

Behandeling voor de voeten

Ga nooit rechtstaan op het toestel maar zit neer voor de behandeling.

Opmerkingen

- Tijdens iedere behandeling altijd de metalen plaatsjes volledig bedekken met vochtige viltjes. Nooit rechtstreeks in contact staan met de plaatjes tijdens de behandeling.
- Indien er kloven of wonden aan de voeten zijn, wat vaseline aanbrengen op die plaatsen.
- Geen juwelen (ringen, uurwerken of armbanden) dragen tijdens de behandeling.
- Na iedere behandeling, de regelknop op OFF draaien.
- Het doel van iedere behandeling is om op zo'n hoog mogelijk niveau elektrische impulsen te verdragen.
- Het zweten vermindert variërend na zes tot twintig dagen.
- Iedere dag de behandeling herhalen gedurende een dertig-tal minuten.
- Afbouwen van de therapie indien het zweten afneemt door vb de behandeling om de twee dagen te herhalen en zo verder af te bouwen tot één maal in de week. Dit geeft op lange termijn beter resultaat.
- U kunt onmiddellijk terug met de therapie starten wanneer plotseling het zweet toeneemt. Hervat dan de behandeling tot het zweten volledig stopt.

Contra-Indicaties

- **Patiënten met hartklachten of een pacemaker/cardiodefibrillator, metalen implantaten, epilepsie of zwangerschap, flebotrombosis, tromboflebitis komen niet in aanmerking voor deze behandeling. Dit toestel wordt ook niet aangeraden voor kinderen onder de negen jaar.**
- Raadpleeg een arts bij optreden van onregelmatig zweten van handen / voeten.
- Zeer zeldzaam kan er een grijze verkleuring optreden op de huid door vb blootgesteld te zijn aan een te hoog niveau aan elektrisch impulsen. Indien dit gebeurt, behandeling stopzetten en de huid de kans geven om zichzelf te laten herstellen. Daarna de behandeling aanvangen met een lager niveau.

Onderhoud toestel

- Batterijen na veertien beurten vervangen (originele batterijen gebruiken). Controle lampje wordt rood.
- Indien het toestel tijdens een lange periode niet gebruikt wordt, gelieve dan de batterijen uit het toestel te halen.
- Viltjes minstens elk jaar vernieuwen.

Batterijen vervangen

