

DRIONIC ANTI-TRANSPIRATIETOESTEL OKSELS



1. INHOUD TOESTEL

- Vier matjes
- Toestel en batterijen
- Twee schouderbandjes

2. GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding

- Neem de vier viltjes uit het toestel en dompel deze in leidingwater (geen gedistilleerd water) gedurende ongeveer vijf minuten. Laat ze daarna even uitlekken.
- Matjes niet uitwringen en terugplaatsen in het toestel.
- Opgelet: Er mag geen water in het toestel komen waar de elektronica van het toestel zit. Indien dit toch gebeurt, zet het toestel meteen uit en dep alles droog.
- Maak de viltjes nooit nat terwijl ze nog in het toestel zitten. Zorg ervoor dat de viltjes de metalen plaatjes volledig bedekken.

Werkwijze

- Bevestig het schouderbandje door de plastic haakjes vast te klikken op de metalen staafjes.
- Plaats het toestel onder uw arm. De top van de viltjes moet het midden en diepste punt van uw oksel raken.
- Zet het toestel aan (controlelampje brandt groen) op de eerste stand (LO) of tweede stand (HI).
- Bij gewaarwording van tintelingen zit je goed. Dit dien je dertig minuten vol te houden. Indien je pijn ervaart, dien je het toestel lager te zetten. Afhankelijk van persoon tot persoon verdraag je de HI stand niet (pijnlijk) en dien je over te schakelen naar LO. Indien je niets voelt dan dien je over te schakelen op de hogere stand. Indien men de behandeling dient toe te passen op de LO stand, kan het zijn dat je de totale behandeling langer dient toe te passen. Variërend tussen de zes tot twintig dagen vermindert het zweeten.
- Wanneer er geen groen lichtje brandt bij aanzetten van het toestel dien je de batterij te vervangen.
- Tip: wanneer je de haakjes van de schouderbandjes vastmaakt, doe dit dan met de opening naar boven. Zo blijven de bandjes goed vastzitten tijdens de behandeling.
- Na de behandeling het toestel afzetten, de viltjes uitnemen en spoelen met water en laten drogen aan beide kanten.
- De gemiddelde totale behandeltime duurt zeven uur. Dit is slechts een richtlijn. Stop de behandeling indien je merkt dat het transpireren plots gedaan is. Herbegin de behandeling na enkele weken, zodra je merkt dat het overmatig transpireren opnieuw begint.

Opmerkingen

- Tijdens iedere behandeling, altijd de metalen plaatjes volledig bedekken met vochtige viltjes. Nooit rechtstreeks in contact staan met de plaatjes tijdens de behandeling.
- Indien er kloven of wonden zijn, wat vaseline aanbrengen op die plaatsen.
- Na iedere behandeling de regelknop op OFF draaien.
- Het doel van iedere behandeling is om op zo'n hoog mogelijk niveau elektrische impulsen te verdragen.
- Variërend na zes tot twintig dagen vermindert het zweeten.
- Iedere dag de behandeling herhalen gedurende een dertig-tal minuten.
- Afbouwen van de therapie indien het zweeten afneemt, door vb de behandeling om de twee dagen te herhalen en zo verder af te bouwen tot één maal in de week. Dit geeft op lange termijn beter resultaat.
- U kunt onmiddellijk terug met de therapie starten wanneer plotseling het zweet weer toeneemt. Hervat dan de behandeling tot het zweeten volledig stopt.

Contra-Indicaties

- Patiënten met hartklachten of een pacemaker/cardiodefibrillator, metalen implantaten, epilepsie of zwangerschap, flebotrombosis, trombophlebitis komen niet in aanmerking voor deze behandeling. Dit toestel wordt ook niet aangeraden voor kinderen onder de negen jaar.
- Bij optreden van onregelmatig zweten van de oksels, consulteer een arts.
- Zeer zeldzaam kan er een grijze verkleuring optreden op de huid door vb blootgesteld te zijn aan een te hoog niveau aan elektrisch impulsen. Indien dit gebeurt, behandeling stopzetten en de huid de kans geven om zichzelf de laten herstellen. Daarna de behandeling aanvangen met een lager niveau.

Onderhoud toestel

- Batterijen gaan ongeveer dertig tot veertig uur mee. (originele batterijen gebruiken). Indien het groene lichtje niet meer brandt, wil dit zeggen dat de batterijen plat zijn.
- Indien het toestel tijdens een lange periode niet gebruikt wordt, gelieve dan de batterijen uit het toestel te halen.
- Viltjes minstens elk jaar vernieuwen.

Batterijen vervangen

